



## Detergent dezinfectant Oxivir Excel W3204, 5L

Pret: 422<sup>37</sup> RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

### Descriere

## Detergent dezinfectant Oxivir Excel W3204, 5L

Detergent si dezinfectant pentru dispozitive medicale non-invazive si suprafete neporoase.

Oxivir Excel **detergent si dezinfectant** combinat de la Diversey, **cu tehnologia AHP**, va **ofera cea mai buna alternativa la dezinfectantii traditionali**, oferind eficacitate virucida completa in doar 30 de secunde, fiind in acelasi timp foarte delicat cu suprafetele si prezentand cel mai redus risc pentru personalul si clientii dumneavoastra.

Ingredientul activ, peroxidul de hidrogen, se descompune in apa si oxigen la numai cateva minute dupa utilizare, fara a lasa reziduuri potential daunatoare sau care ar putea modifica aspectul suprafetei.

### Proprietati de baza:

- ? **Eficacitate virucida completa in numai 30 de secunde;**
- ? **Cea mai rapida actiune de pe piata** impotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii si levuri;
- ? **Curatare superioara** cu sistem **de agenti tensioactivi de inalta performanta;**
- ? Nu contine parfum;
- ? Nu necesita clatire;

❓ Mai sigur atât pentru mediu, cât și pentru utilizatori, deoarece ingredientele active se descompun în apă și oxigen, spre deosebire de AFE, ENF și COV.

### **Avantaje:**

❓ Eficacitatea cu spectru larg **asigura cele mai ridicate niveluri de dezinfectie.**

❓ Testat extensiv conform standardelor europene și eficace împotriva mai multor agenți patogeni de interes, **este declarat ca fiind complet virucid inclusiv împotriva poliovirusului, adenovirusului și norovirusului Murin, considerat eficace împotriva tuturor virusurilor încapsulate precum: HIV, HBV, HCV, virusul gripal, virusul Vaccinia și coronavirusuri.**

❓ Sigur pentru utilizatori, nu necesită EIP. **Fără clasificare de pericol;**

❓ **Performanța superioară de curățare și de 10 ori mai rapid decât dezinfectantul dumneavoastră obișnuit;**

❓ **Formula AHP este delicată cu suprafețele**, prelungind durata de viață a echipamentelor. Fără reziduuri;

❓ Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul Retail, Educație, Sanitar și alte sectoare;

❓ Sporește gradul de conformitate a dezinfectiei cu 35%.

## **AVANTAJE CHEIE**



### **EFICACITATE**

Eficacitate virucidă completă în doar 30 de secunde (Coronavirus)  
Cea mai rapidă acțiune împotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii și levuri



### **SIGURANȚĂ**

Siguranță pentru utilizatori, nu este nevoie de EIP  
Compatibilitate ridicată cu suprafețele, neinflamabil  
Șervețelele reduc complet aerosolii și vor crește gradul de conformitate al dezinfectiei cu 35%\*



### **EFICIENȚĂ**

Produs de curățare și dezinfectare universal care îmbunătățește eficiența muncii (disponibil în mai multe variante de ambalare și soluții de dozare).  
Șervețelele Oxivir Excel vă vor crește eficiența cu până la 23%\*  
Ușor de utilizat cu instruire minimă necesară  
Sistem de agenți tensioactivi de înaltă performanță care oferă rezultate superioare de curățare în comparație cu multe alte tehnologii de dezinfectare



### **DURABILITATE**

Compușii activi se descompun în apă și oxigen, ceea ce este mult mai sigur atât pentru mediu, cât și pentru oameni  
Produsele Oxivir nu conțin alchilfenol etoxilați (APE), nonilfenol etoxilați (NPE), compuși organici volatili (VOC)

\* Weimke TL, et. al. Valoarea șervețelor dezinfectante gata de utilizare: Conformitate, timpul angajaților și costuri. Am J Infect Control. 2014; 42: 329-330

## **Instructiuni de utilizare:**

### Curatare si dezinfectare prin pulverizare:

1. Indepartati murdaria grosiera.
2. Aplicati pe suprafete prin pulverizare pe laveta si pe suprafetele de sters sau aplicati direct pe suprafata utilizand un flacon cu pulverizator.
3. Dupa timpul de contact\*, fie stergeti pana la uscare, fie lasati sa se usuce.


### Curatare si dezinfectare prin adaugare in galeata:

1. Indepartati murdaria grosiera.
2. Aplicati pe suprafete cu mopul/laveta.
3. Dupa timpul de contact\*, fie stergeti pana la uscare, fie lasati sa se usuce.
4. Schimbati solutia daca devine vizibil murdara sau cel putin la fiecare 24 ore.

### Sistem cu servetele uscate de unica folosinta:

1. Pregatiti Sistemul de stergere cu servetele uscate de unica folosinta cu produs diluat, conform instructiunilor.
2. Indepartati murdaria grosiera.
3. Scoateti un servetel si stergeti suprafata.
4. Dupa timpul de contact\*, fie stergeti pana la uscare, fie lasati sa se usuce.
5. Schimbati servetelul atunci cand este vizibil murdar, cand nu mai umezeste suprafata sau cand treceti la o alta zona de curatat.

\* Asigurati-va ca suprafetele raman ude pe durata timpului de contact.

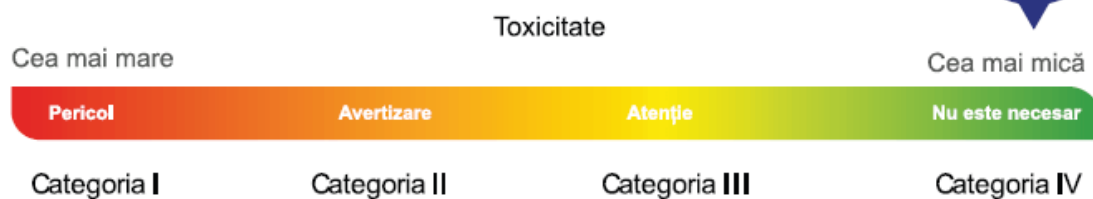

- ▶ Niciun risc semnificativ pentru sănătate
- ▶ Materiale care nu vor arde
- ▶ Materiale care sunt în mod normal stabile, chiar și în condiții de incendiu și **NU** vor reacționa cu apa, nu se vor polimeriza, nu se vor descompune, nu vor condensa sau auto-reacționa. **Non-explosive.**

### Date tehnice:

- ☒ Aspect: Lichid limpede, incolor;
- ☒ Valoare pH (conc.): 0,55;
- ☒ Valoare pH (in soluție): 1,9;
- ☒ Densitate relativa (20 °C): 1,065